

Zoomax[®] Snow **håndholdt** **læseapparat** **Brugsanvisning**



V3.4

Producent: Zoomax[®]
Leverandør: LVI Low Vision International

Indhold


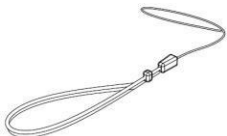




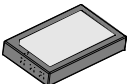
Beskrivelse	3
Tilbehør	3
Generel anvendelse	5
Batteriinstallation	5
Opladning af batteriet	6
Sådan monteres den korte strop	6
Justering af forstørrelsen	8
Skift til visningstilstand	9
Frysning og vist billede	10
Skrivestander	11
Tænd eller sluk for bip	11
Tænd og sluk for kameraets belysning	12
Justering af lysstyrke	12
Tilslutning til et TV	13
Strømsparefunktion	14
Hukommelsesfunktion	14
Fabriksnulstilling	14
Fejlfinding	14
Sikkerhed	16
Specifikationer	17

Beskrivelse


Zoomax[®] Snow er et letvægts håndholdt elektronisk læseapparat med en stor 4.3" LCD-skærm i bredformat. Det giver forstørrelse fra 2x til 16x, samt 10 kontrast tilstande, og har mulighed til at fryse et billede for et nærmere kig. Det har også et moderne design med en strømbesparende funktion.


Tilbehør

Zoomax[®] Snow-pakken indeholder følgende:

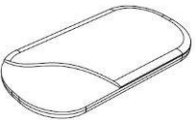 Læseapparat	 Kort strop	 Brugsanvisning
 Videokabel	 Beskyttelseskasse	 AC strømforsyning
 Genopladeligt litiumbatteri		


Billede af Zoomax Snow nedenfor med beskrivelser af knapper, stik og lys:

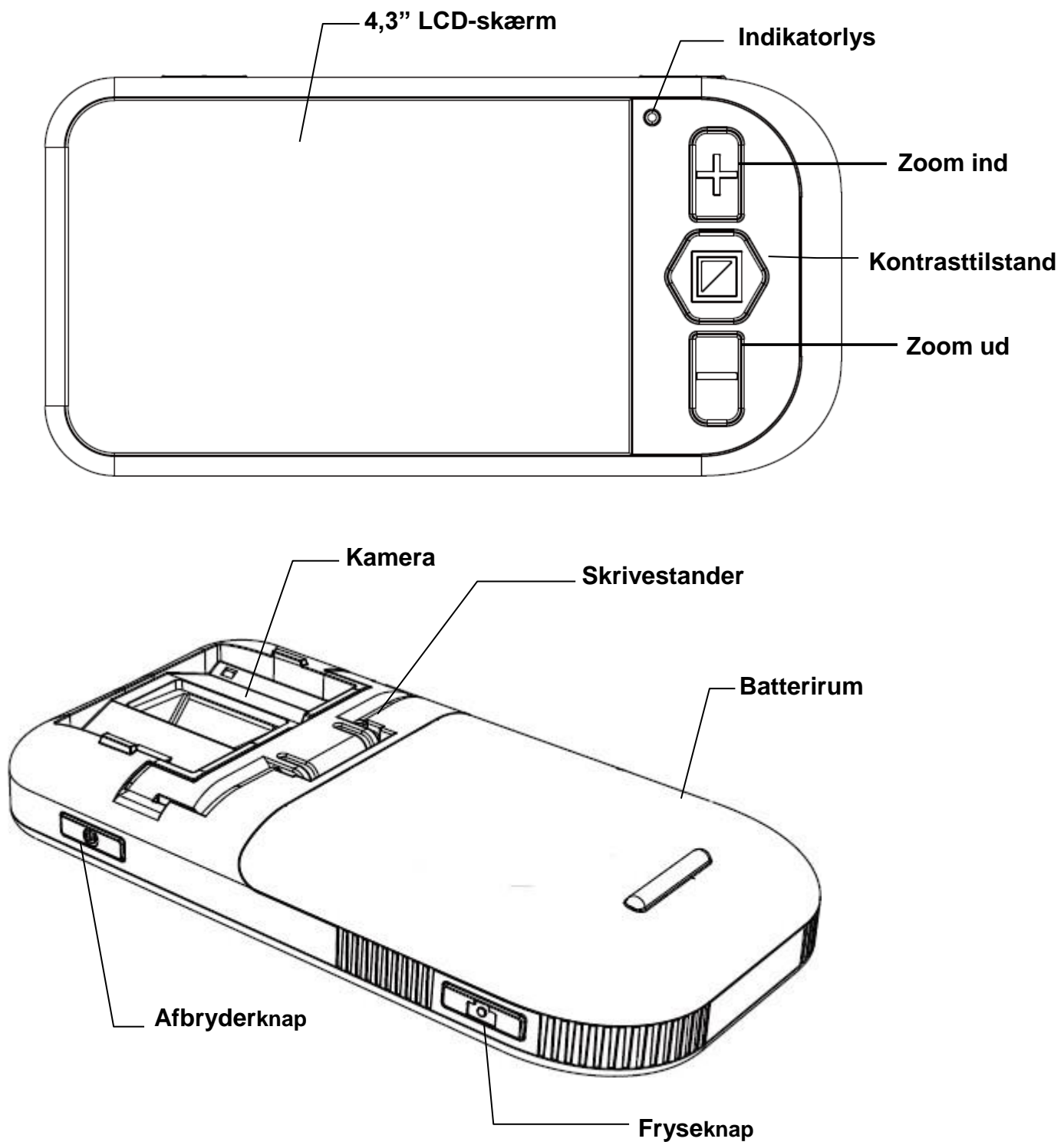

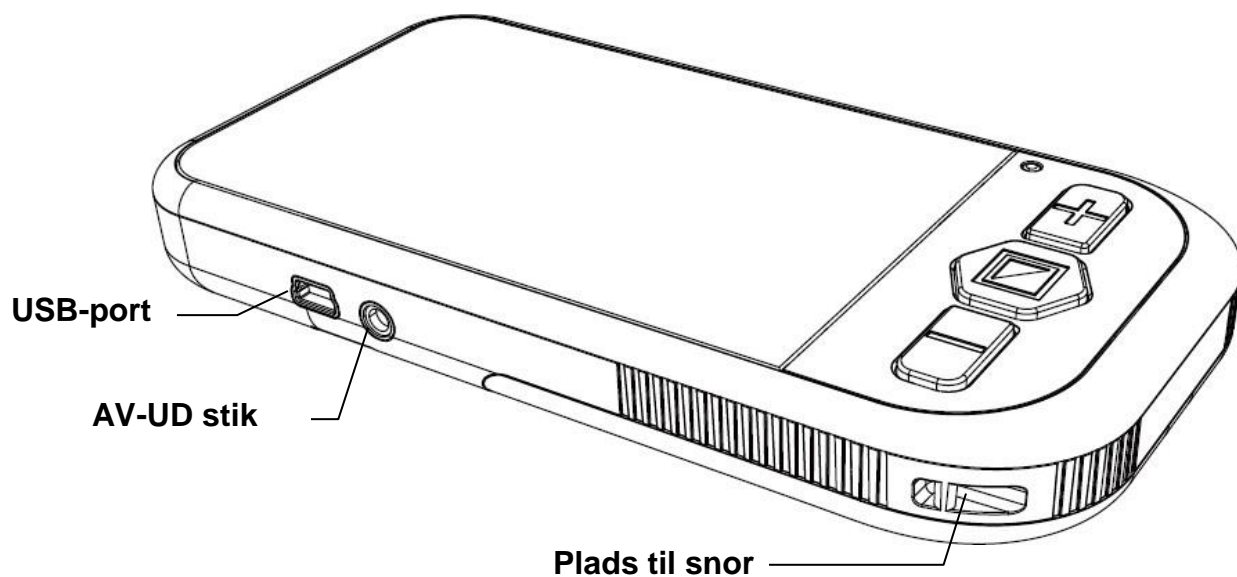

Generel anvendelse


Batteriinstallation

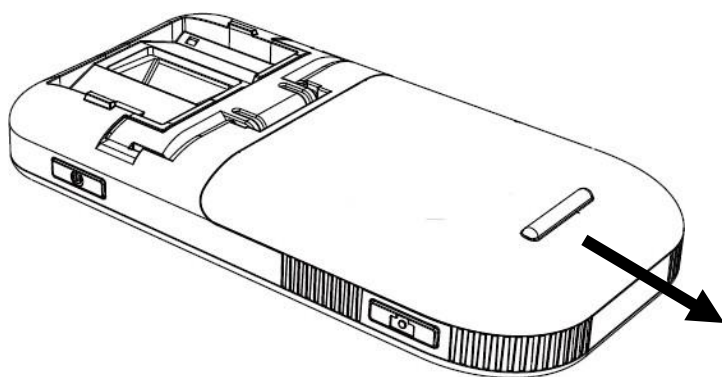

Installer batteriet som følger:

1. Vend apparatet rundt, så bunden vender opad
2. Tryk og træk batteridækslet åbent
3. Indsæt batteriet, så hullerne på batteriet passer med stifterne i batterirummet.
4. Skyd dækslet tilbage og skub det i lukket position

Opladning af batteriet

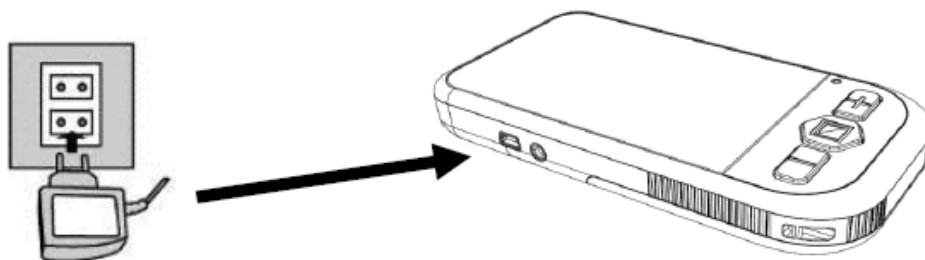

VIGTIGT:

Batteriet skal oplades, før du bruger Snow for første gang. Slut strømadapteren til USB-porten, og sæt derefter den anden ende af strømforsyningen i stikkontakten. Strømindikatoren vil være rød, mens opladningen er i gang. Når batteriet er fuldt opladet, slukker LED-indikatoren.

Hvis batteriindikatoren på skærmen under normal drift ikke har nogen striber og blinker, er batteriet lavt, og du skal genoplade det. Opladning af batteriet tager cirka 4 timer, og et fuldt opladet batteri holder i cirka 3,5 timer. Du kan købe et ekstra batteri til lange ture eller forlænget brug.


Sådan monteres den korte strop



Indsæt den lille løkke gennem hjørnet af Zoomax designet til håndledsremmen. Træk den anden ende af stroppen gennem løkken og stram.

Betjeningsvejledning


Tryk og hold den lyseblå knap på Snows øverste kant i to sekunder for at starte apparatet. Den grønne strømindikator lyser, og apparatet vil gå i funktion læseapparat.

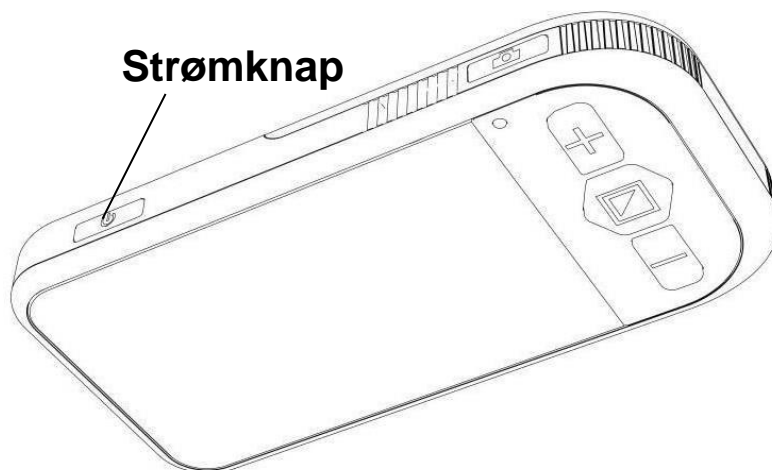

Tryk og hold afbryderknappen nedtrykket i to sekunder for at slukke for apparatet. Den grønne indikatorlampe slukker samtidig.

For på at spare strøm, vil apparatet slukke automatisk efter tre minutters inaktivitet.

Justering af forstørrelsen

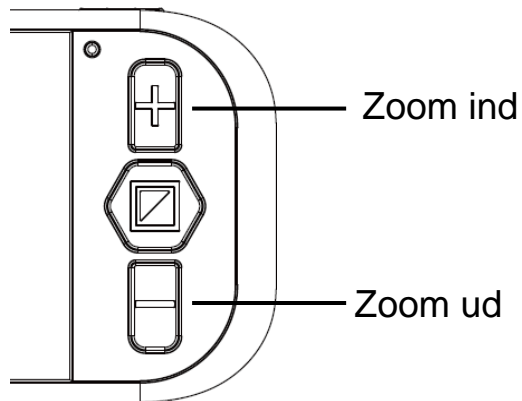


Tryk på knappen "+" for at zoome ind og tryk på knappen "-" for at zoome ud.

Forstørrelsesniveauer:

- En placering af Zoomax fladt på papiret giver dig et forstørrelsesniveau på 3,6x til 16x.
- Løft Zoomax op over materialet lidt, hvilket giver dig et forstørrelsesniveau på 2x til 10x forstørrelse
- Du kan få meget større forstørrelse af det viste materiale, hvis du forbinder Zoomax med et TV. Forstørrelsen afhænger af TV'ets størrelse.

Skift til visningstilstand

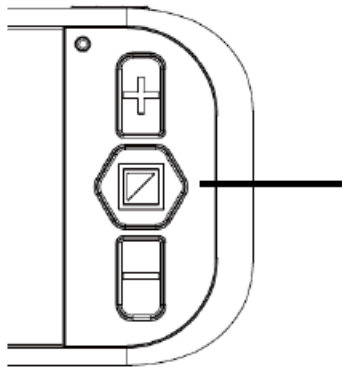

Tryk på tilstandsknappen
(Mode)

Du kan vælge mellem to brugstilstande:

1. Normaltilstand

I normaltilstand skal du trykke på tilstandsknappen (Mode) for at bladre gennem følgende visningsmetoder:

- Fuld farvetilstand
- Gråtilstand
- Høj kontrast med hvid tekst på sort baggrund
- Høj kontrast med sort tekst på hvid baggrund
- Høj kontrast med hvid tekst på blå baggrund
- Høj kontrast med blå tekst på hvid baggrund
- Høj kontrast med gul tekst på sort baggrund
- Høj kontrast med sort tekst på gul baggrund
- Høj kontrast med blå tekst på gul baggrund
- Høj kontrast med gul tekst på blå baggrund

2. Favorit eller forenklet tilstand

I denne tilstand skal du trykke på tilstandsknappen (Mode) for at bladre gennem tre grundlæggende tilstande: fuld farve, din foretrukne kontrastfarve og dens omvendte farve (f.eks. hvid på blå og blå på hvid).

For at gå ind i foretrukket farvetilstand, skal du først vælge din foretrukne kontrastfarve i normal tilstand, og

derefter trykke på tilstandsknappen (Mode) og hold den nede i to sekunder, indtil du hører et BIP.


BEMÆRK: Hvis enheden åbner i favorit mode fra fuldfarvetilstand eller gråtilstand, vil kontakten være mellem fuld farve, hvid på sort og sort på hvid.

For at forlade favorit farvetilstand, trykkes og nedholdes tilstandsknappen (Mode) i to sekunder, indtil du igen hører et BIP.

Bemærk venligst, at hvis du slukker for enheden under favorittilstand, vil den gemme indstillingerne og automatisk komme i favorittilstand når den tændes næste gang.

Frysning og vist billede.


Fryseknop

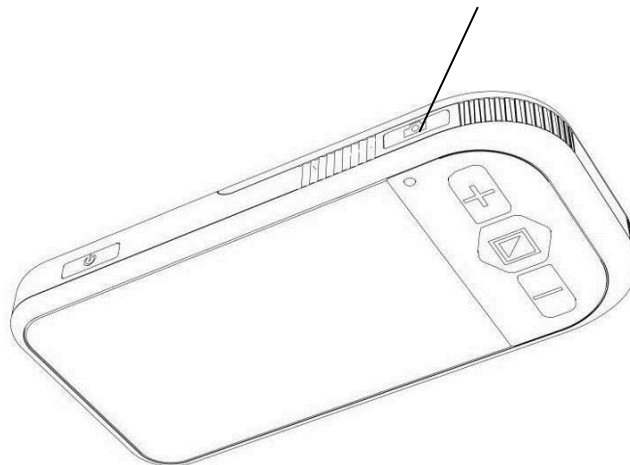

- Brug fryseknappen til at optage billeder og bogstaver
- Placer enheden over objektet eller materialet
- Tryk på fryseknappen
- Du kan nu løfte apparatet og bringe det nærmere dig for at se på billedet.


- Tryk på fryseknappen igen for at gå tilbage til den normale billedvisning.

Skrivestander

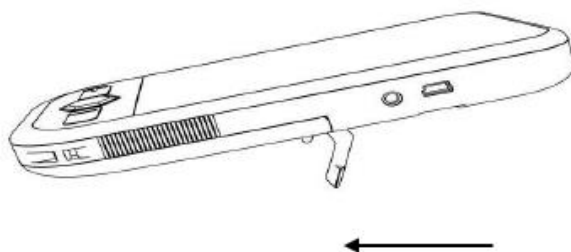

Åben skrivestanderen for at gøre det muligt for dig at skrive under kameraet.

Tænd eller sluk for bip.

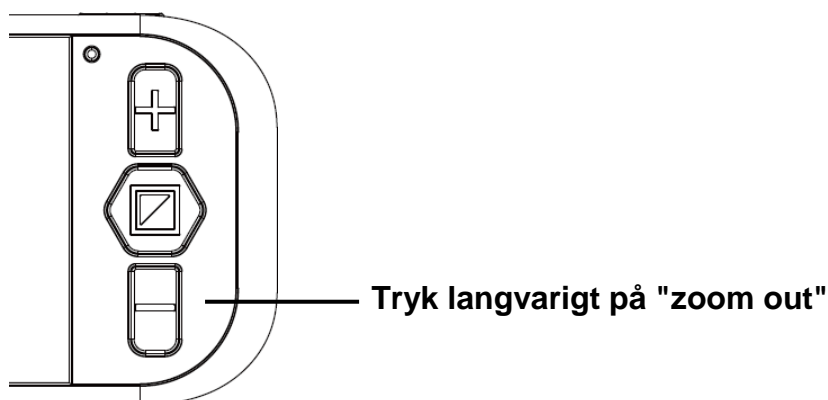


Som standard er knaplyden slået fra.

For at slå knaplyden til trykkes og nedholdes "Zoom ud"-knappen i fem sekunder, indtil du hører to BIPs.

For at slå knaplyden fra trykkes og nedholdes "Zoom ud"-knappen i fem sekunder, indtil du hører ét BIP.

Tænd og sluk for kameraets belysning

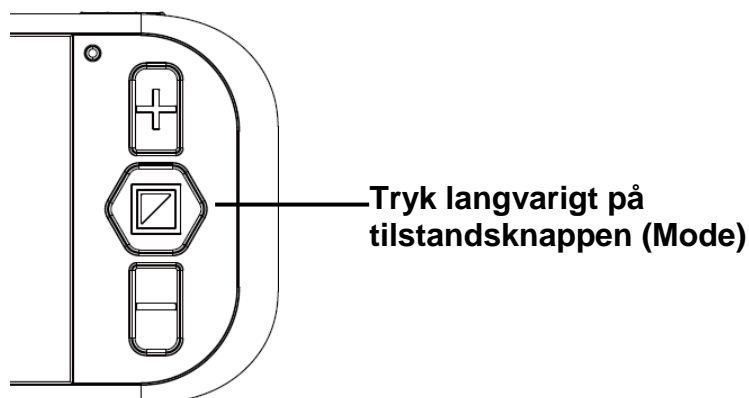

Som standard er kameraets belysning slået til.

For at slukke lyset trykkes og nedholdes tilstandsknappen (Mode) i fem sekunder, indtil du hører to BIPs. Bemærk (hold trykket, hvis du kun hører et bip).


For at tænde lyset trykkes og nedholdes tilstandsknappen (Mode) i fem sekunder, indtil du hører to BIPs. Bemærk (hold trykket, hvis du kun hører et bip).

Justering af lysstyrke

Hold fryseknappen og zoom-knappen nedtrykket samtidigt for at åbne funktionen justering af lysstyrken. En lysstyrkebjælke vises, tryk på zoom ind-knappen for at øge lysstyrken og knappen Zoom ud for at reducere den igen. Tryk på tilstandsknappen (Mode) for at bekræfte lysstyrke og afslutte. Bemærk, at hvis du ikke bruger enheden i fem sekunder, afbrydes den automatisk under denne indstilling.

Tilslutning til et TV

Tilslut det AV-kabel, der følger med din enhed, til det gule videostik på dit TV.

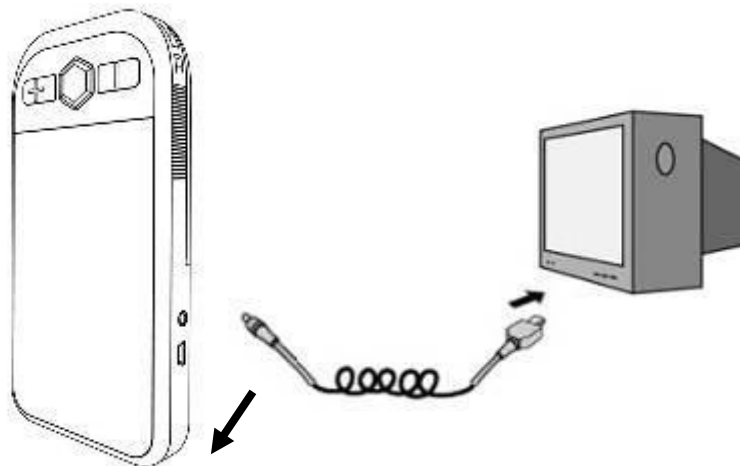

- Når du har tilsluttet kablet, slukker LCD-skærmen automatisk, og billedet vises på din TV-skærm.
- Tryk og hold fryseknappen i tre sekunder for at vælge den relevante TV-standard. Brug knapperne zoom ind og zoom ud til at vælge mellem PAL eller NTSC, og tryk derefter på tilstandsknappen (Mode) for at bekræfte dit valg. Hvis alt er korrekt, vises billedet på dit TV.
- Når dit valg er bekræftet, bliver det standard TV-standard på apparatet, næste gang du tilslutter kablet. Der er ikke behov for at indstille det igen.
- Efter at AV-kablet er taget ud, vender billedet automatisk tilbage til apparatets LCD-skærm uden at nogen anden betjening er nødvendig.

Strømsparefunktion

I forstørrelsesfunktionen slukkes enheden automatisk, hvis der ikke er nogen betjening i over tre minutter. Når enheden oplader, skifter den automatisk til strømforsyningen, mens du oplader batteriet samtidigt.

Hukommelsesfunktion

Zoomax Snow gemmer automatisk de seneste indstillinger (fx farvetilstand, forstørrelse, format for videoudgang, knaplyd og lysstyrke) og bruger dem, næste gang du tænder.

Fabriksnulstilling

Under den laveste forstørrelsesindstilling trykker du samtidig på afbryderknappen og zoom ud-knappen i fem sekunder for at gendanne de oprindelige fabriksindstillinger.

Fejlfinding

Problemer	Løsninger
Sort skærm	<ol style="list-style-type: none">1. Kontroller, at strømmen er tændt.2. Oplad batteriet.3. Reducer forstørrelsesniveauet.4. Sørg for at billedet befinder sig under trådkorset.
Enheden vil ikke starte.	Oplad batteriet.
Billedet på skærmen er mørkt eller forvrænget.	Sørg for at læseapparatet står fladt på siden.
Strømforsyningen er	Sørg for at der er strøm i

tilsluttet, men batteriet oplader ikke.	stikkontakten, og stikket er sat helt ind i stikkontakten.
Klatter eller pletter på skærmen.	Rengør kamera og skærm med en blød klud.
Teksten er for lille til at kunne læses.	Juster forstørrelsen op til et passende niveau. <ul style="list-style-type: none"> • Tilslut et TV med det medfølgende kabel.
Teksten er for stor til at kunne læses.	<ul style="list-style-type: none"> • Juster forstørrelsen ned på et passende niveau. • Løft/flyt enheden lidt væk fra det betragtede materiale.
Enheden er tilsluttet et TV, men der vises intet billede på TV-skærmen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontroller at TV'et er tændt. • Kontrollér at strømmen er korrekt forbundet til TV'et
Skærmen er frosset eller forvrænget, eller der opstår et andet problem, som ikke er beskrevet i denne vejledning.	Genstart apparatet eller fjern og genindsæt batteriet.

Hvis dit problem ikke er angivet ovenfor, bedes du kontakte din lokale distributør.

Sikkerhed

For at holde dit læseapparat i optimal stand, skal du læse de følgende retningslinjer om sikkerhed omhyggeligt:

- Udsæt ikke dit læseapparat for overdrevet varme eller direkte sollys for at undgå brandfare.
- Hold dit læseapparat væk fra våde områder, regn, væsker og kemikalier.
- Brug altid dit læseapparat i et miljø, hvor temperaturen ligger mellem 10 °C og 40 °C (50 og 104F).
- Forsøg ikke at reparere dit læseapparat eller åbne det. Det vil gøre garantien ugyldig. Kontakt din distributør for at give service på dette apparat.
- Afbryd altid strømmen inden rengøring. Brug kun en fugtig, blød, fnugfri klud. Brug ikke alkoholbaserede opløsningsmidler eller andre rengøringsmidler.
- Brug kun den medfølgende strømforsyning til at oplade batteriet, da andre adaptere kan beskadige apparatet.

Specifikationer

1. Forstørrelse: 2x til 16x
2. Visningstilstande: ti tilstande (fuld farve, grå, høj kontrast hvid på sort, høj kontrast sort på hvid, høj kontrast hvid på blå, høj kontrast blå på hvidt, høj kontrast gul på sort, høj kontrast sort på gul, høj kontrast blå på gul, høj kontrast gul på blå)
3. Fokus: Autofokus
4. Skærm: 4,3" (109 mm) TFT bredformat
5. TV-udgang: PAL/NTSC
6. Strømsparetilstand: Apparatet slukker automatisk, hvis det ikke har været betjent i tre minutter
7. Batteri: genopladeligt litiumbatteri med kapacitet til 3,5 timers kontinuerlig brug
8. Indikator for batteriniveau: Positiv
9. Strømforsyning: indgang: 110 - 240V, udgang: 5V/1A
10. Opladningstid: 4 timer
11. Vægt: 165 gram (uden batteri)
12. Tilbehør: brugsvejledning, genopladeligt litiumbatteri, vekselstrømsadapter, kort strop, beskyttelseskasse, videoudgangskabel
13. Betjening og opbevaringsvilkår:
Fugtighed < 70 %
Temperatur: 10-40°C